



VISOCALL IP. Hasta El Seti.


Kullanım kılavuzu.

HEALTH CARE

www.schrack-seconet.com

SCHRACK
S E C O N E T


Hasta elseti telefon özellikleri.

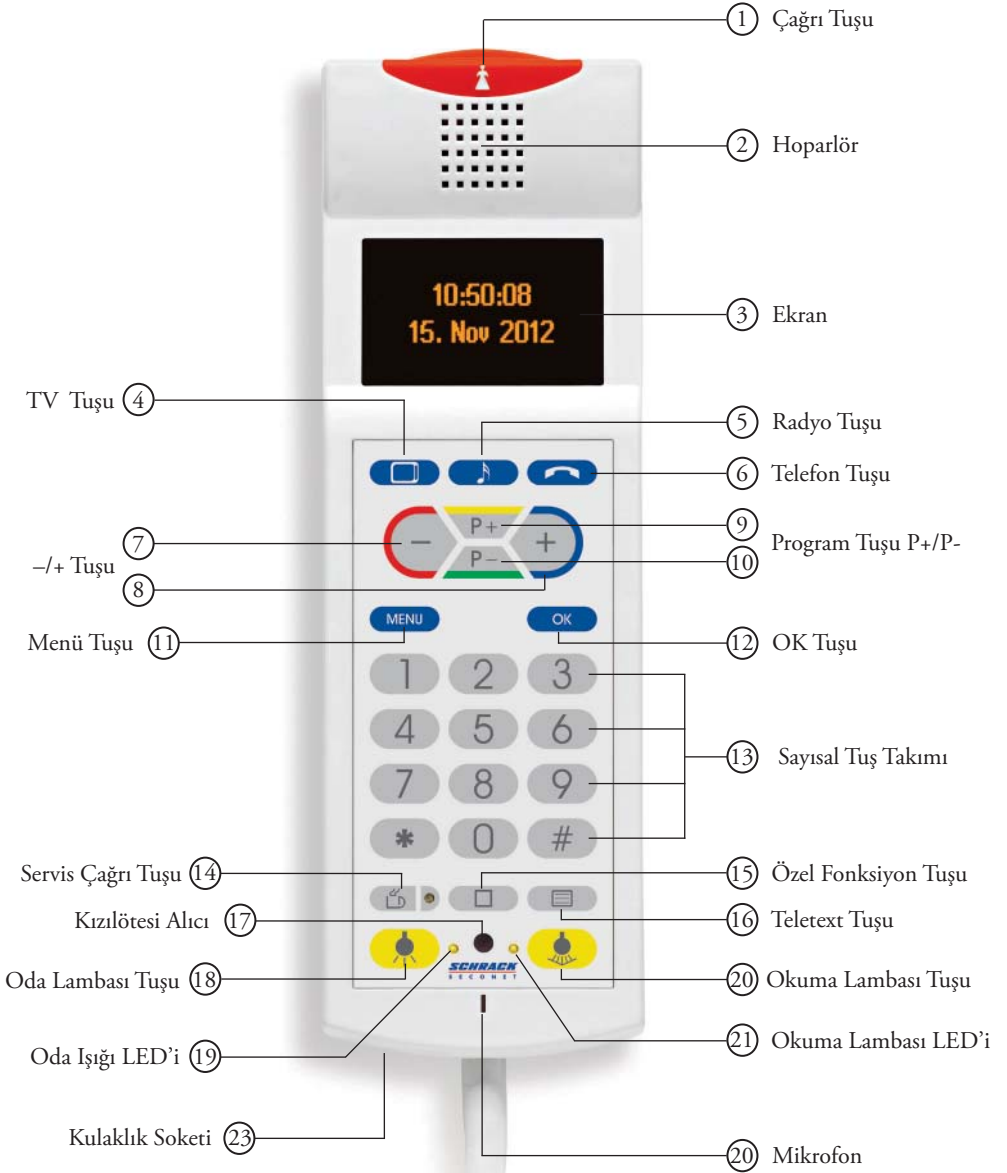


DIKKAT: Herhangi bir bağlantı kopukluğunda bağlantı hatası otomatik olarak tetiklenecektir.
Bağlantı hatası resetlendikten sonra cihazın bağlantısı mutlaka kontrol edilmeli

Hemşire Çağrı

Hemşire Çağrısı Yapmak İçin:


- Çağrı tuşuna basın (1) 
- Çağrı tuşundaki ışık yanacak (1)

Hemşire Cevabı:


- Hoparlörden gong sesi gelecek (2)
- Çağrı tuşundaki ışık yanıp sönecek (1) 
- Hemşire ile hoparlörü kullanarak konuşun. (2) mikrofonla (13) (Telefon gibi)
- Hemşire çağrısı sonlandırılacak

Radyo

Radyoyu Açmak İçin:

- Radyo tuşuna basın (5) 
- Son dinlenen radyo istasyonu ekranda gözükecektir (3)

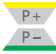

İstasyon Seçimi:

- İstasyonu P+ (9) or P- (10) tuşlarını kullanarak seçin 
- Seçtiğiniz istasyon ekranda gözükecektir. (3)


Radyo Sesi:

- Hoparlör kullanarak (2) veya kulaklık ile (bağlantı soketi --> 23)

Ses:


- Tuş (7) sesi kısma için 
- Tu (8) sesi açma için 

Radyoyu Kapatmak İçin:


- Radyo tuşuna basın (5) 

Işık Açma / Kapama

Oda Lambası (opsiyonel):


- Oda lambası tuşuna basın (18) 
- Oda lambası açılıp kapanacak

Okuma Lambası (opsiyonel):


- Okuma lambası tuşuna basın (20) 
- Okuma lambası açılıp kapanacak

Televizyon (opsiyonel)

Televizyonu Açmak İçin:

- TV tuşuna basın (4) 
- Televizyon açılacak
- Son izlenen kanal ekranda gözükecek (3)



Program Seçimi :

- Direkt olarak sayısal tuştakımından (13) veya adım adım P+ (7) ve P- (20) tuşları ile 



Televizyon Sesi:

- Hoparlör ile (2) veya kulaklık ile (Bağlantı soketi --> 23)
- Opsiyonel olarak televizyonun kendi hoparlörleri ile


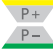


Ses:

- Tuş (7) sesi kısma için 
- Tu (8) sesi açma için 


Teletext Açma / Kapama:

- Teletext tuşuna basın (16) 
- Sayısal tuş takımı ile sayfa seçin (13)
- modundan çıkmak için teletext tuşuna basın (16) 

Stor Perde Kontrolü (opsiyonel)

- Özel fonksiyon tuşuna basın (15) 
- Ekran (3) özel fonksiyonları gösterecek
- "Stor Perde" özelliğini P- tuşunu kullanarak seçin 
- Stor perdeyi (7), (8)  ve (8) tuşları ile açip kapatabiliriz 



Çağrı servis personeli

- Servis çağrısı tuşuna basınız(14) 
- Servis çağrısı lambası yanacak




Servis personeli hoparlör ile bağlantıya geçecek yada yanınıza gelecektir.

Telefon çağrısı yapmak (opsiyonel)





Çağrı Cevaplamak İçin:

- Telefon çalma sesi cihazın içindeki hoparlörden duyulur
- Cevaplamak için telefon tuşuna basın (6) 
- Konuşma bittiğinde çağrıyı sonlandırmak için tekrar telefon tuşuna basın (6) 



Çağrı Yapmak İçin:

- Telefon tuşuna basın (6) 
- Çevir sesi hoparlordan duyulacaktır (2)
- Telefon santral tuşuna basın (Genellikle "0."dır. Görevliye danışın)
- Sayısal tuş takımını kullanarak numarayı çevirin (13)
- Tuş (12) 'e basın 
- Konuşmanızı yapın ve görüşme bittikten sonra tekrar telefon tuşuna basıp kapatın (6) 


Son Çevrilen Numaranın Tekrar Aranması:

- Telefon tuşuna basın (6) 
- Son 10 aranan numara ekranda gözükecektir(3)
- Numrayı tuşları kullanarak seçin (7) veya (8) 
- Numarayı seçtiğinizde arama tuşuna basın (12) 
- Seçtiğiniz numara aranacaktır
- Konuşma bittiğinde çağrıyı sonlandırmak için tekrar telefon tuşuna basın (6) 

Ses:


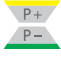



- Tuş (7) sesi kısma için 
- Tu (8) sesi açma için 

Gösterle Lambaları






(1, 19 e 21) numaralı ışıklar gece kullanımını kolaylaştırmak için sürekli yanar konumdadırlar. Çağrı butonuna basıldığında (1) entegre LED yanıp sönecektir. 

Menu Fonksiyonları






Ekran Aydınlatması Ayarları:

- Menu Tuşuna Basın (11) 
- Menu ekranda gözükecektir (3)
- Aydınlatma ayarını P-/P+ tuşunu kullanarak seçin (9) veya (10) 
- Tuşa basın (12) 
- (7) veya (8) tuşlarını kullanarak ayarı yapın 
- Menuden çıkmak için tekrar menu tuşuna basınız (11) 

Ekran Kontrast Ayarı:

- Menü tuşuna basın (11) 
- Menu ekranda gözükecektir (3)
- Kontrast ayarını P-/P+ tuşunu kullanarak seçin (9) veya (10) 
- Tuşa basın (12) 
- (7) veya (8) tuşlarını kullanarak ayarı yapın 
- Menuden çıkmak için tekrar menu tuşuna basınız (11) 

Ses Ayarı:

- Menu Tuşuna Basın (11) 
- Menu ekranda gözükecektir (3)
- Ses ayarını P-/P+ tuşunu kullanarak seçin (9) veya (10) 
- Tuşa basın (12) 
- (7) veya (8) tuşlarını kullanarak ayarı yapın 
- Menuden çıkmak için tekrar menu tuşuna basınız (11) 

Dezenfektanlar

PAT el terminalinin temizlenmesi için yalnızca ester veya keton içermeyen dezenfektanlar, konsantrasyon veya seyreltik oranda kullanılmalıdır. Dezenfeksiyon işleminde yalnızca dezenfektan silme malzemesi kullanılmalıdır.

Herşeyi kontrol edebileceğiniz cihaz.

Sayın hastamız,

Bu çok yönlü cihaz ile yatağınızdan televizyon,telefon,oda lambası,okuma lambası,hemşire çağrısı gibi servisleri kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.
En önemli fonksiyonlar için lütfen biraz zaman ayırın !

Bu kontrol cihazı hastanede kaldığınız süreyi olabildiğince konforlu bir hale getirecektir.



Herhangi bir acil durumda kırmızı hemşire çağrı tuşunu kullanarak çağrı yapabilirsiniz.

İlerleyen sayfalarda cihazın detaylı kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
Yinede sorularınız olursa hastane personelimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır

Güvenlik ve konfor, çağdaş ve en üst düzeyde.

Kullanmakta olduğunuz cihaz güvenilirlik ve geleceğe yönelik teknolojisi sayesinde öne çıkmaktadır. Dünya çapında en iyi hastanelere ve bakım tesislerinde güven ile kullanılmaktadır.

Hastane iletişiminin bir adı var SCHRACK-SECONET



SCHRACK SECONET AG

Eibesbrunnergasse 18
A-1122 Vienna
Tel.: +43-1-81157-0
office@schrack-seconet.com



Czech Rep. • CZ-100 00 Prague 10, V Úžlabině 1490/70 • Tel.: +420-2-74782284
Hungary • HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 • Tel.: +36-1-4644300
India • IN-122002 Gurgaon, Technopolis, DLF Golf Course Road, Sector-54 • Tel.: +91-124-4626248
Poland • PL-02-583 Warsaw, ul. Wołoska 9 • Tel.: +48-22-3300620
Romania • RO-021723 Bucharest, Sos.lancului nr. 6A, Sector 2 • Tel.: +40-21-6533246
Russia • RU-129626 Moscow, Ul. Staroalexejevskaja 5 • Tel.: +7-495-510 50 15
Slovakia • SK-83527 Bratislava–Rača, Mudrochova 2 • Tel.: +421-2-44635595
Sweden • SE-145 84 Norsborg, Botvid Business Center • Tel.: +46-8-680 18 60
Turkey • TR-34722 Kadıköy-İstanbul, Kasap İsmail Sk. 5/12 • Tel.: +90-216-345 51 99

HEALTH CARE

www.schrack-seconet.com

SCHRACK
S E C O N E T